


NAVODILA


ZA UPORABO TELEFONA

Lifeline 2 Plus

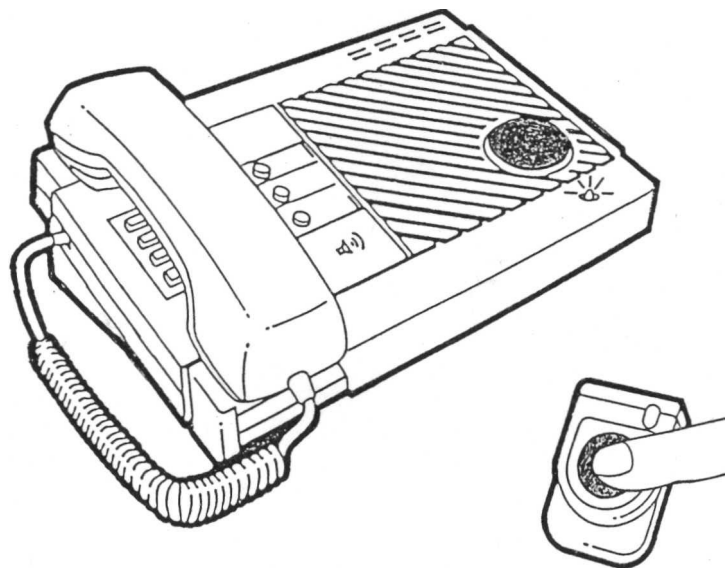

- VAŠ TELEFON *Lifeline 2 Plus*
- KAJ STORITI V SILI
- V VLOGI NAVADNEGA TELEFONSKEGA APARATA
- DODATKI TELEFONU *Lifeline 2 Plus*
- OPOZORILA

TELEFON *Lifeline 2 Plus*

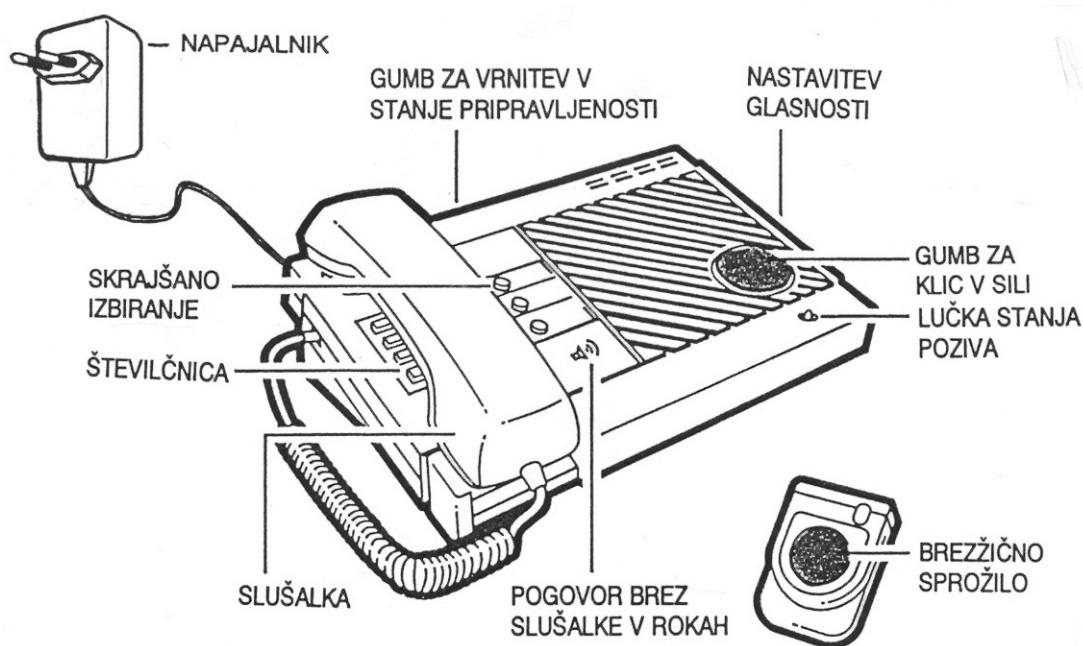

Lifeline 2 Plus je poseben telefonski aparat za klic za pomoč, ki ga priključimo na obstoječe telefonsko omrežje. Namenjen je tistim, ki živijo sami in občasno ali le izjemoma potrebujejo pomoč na domu.

S telefonom *Lifeline 2 Plus* sami pokličete na pomoč, v nekaterih primerih pa to samodejno opravi naprava. Telefonu *Lifeline 2 Plus* lahko vpišemo šest telefonskih števil, na katere se usmeri nujni klic. Številke, na katere boste želeli usmeriti nujni klic, bo namesto vas s pomočjo tipkovnice vpisala strokovno usposobljena oseba, ali pa bo to storila na daljavo po telefonski žici. Klic v sili lahko sprožite na več načinov. Najenostavneje to opravite z brezžičnim sprožilom npr. kar s tal, iz postelje ali naslonjača, od koder se lahko brez slušalke v rokah pogovarjate z osebo na drugi strani žice. Ta oseba je lahko kdo od svojcev, sosed ali dežurna oseba v sprejemnem centru službe "Halo, pomoč!".

Vaše brezžično sprožilo je pravzaprav majhen radijski oddajnik, ki mora biti vedno pri roki. Je lahek, vodotesen in primeren za pripenjanje na vse vrste oblačil. Podnevi ga nosite pripetega na bluzo, pas, jopico itd., ponoči pa ga imejte pri postelji. Ob pritisku na rdeči gumb brezžičnega sprožila boste ukazali posebnemu telefonu *Lifeline*, naj pokliče npr. v sprejemni center "Halo, pomoč!". Dežurni operater bo če vedel, kdo ste in

kje živite, tudi v primeru, če ne morete govoriti ali če ne boste slišali njegovega glasu po zvočniku telefona.

PRIKLJUČITEV POSEBNEGA TELEFONA *Lifeline 2 Plus*

Telefon *Lifeline 2 Plus* usposobite za delo tako, da napajalnik vtaknete v vtičnico 220V električnega omrežja, vtičač na koncu telefonske vrvice pa vtaknete v telefonsko vtičnico v zidu. Kolobar okrog rdečega gumba na telefonu *Lifeline* mora svetiti, iz dvignjene slušalke pa se mora slišati znak telefonske centrale. Če svetlobni kolobar ne sveti, preverite omrežni priključek. V primeru, da iz slušalke ne prihajajo značilni toni ("tu...tu"), preverite priključitev telefonske vrvice.

PRIKLJUČITEV DODATNEGA TELEFONA VZPOREDNO TELEFONU *Lifeline*

Svetujemo vam, da k posebnemu telefonu *Lifeline* ne priključujete drugega telefona. Vaš posebni telefon bo tako deloval zanesljivejše. Tudi PTT predpisi omejujejo priključitev več telefonov na en telefonski priključek, saj lahko pride do preobremenitve telefonske linije.

KAJ STORITI V SILI

Za klic v sili **pritisnite**:

-rdeči "GUMB ZA KLIC V SILI" na telefonu

ali

-rdeči "GUMB ZA KLIC V SILI" na vašem brezžičnem sprožilju.



V obeh primerih pritisnite **samo en gumb** in to le **enkrat**. če se nahajate v bližini telefona, boste opazili, da bo pričela lučka "STANJE POZIVA" utripati. čez nekaj časa se bo oglasila oseba s telefonske številke, ki je vpisana v vaš telefon - npr. večurni operater centra "Halo, pomoč!". Razložite mu, kaj vas teči, da bo priskrbel ustrezno pomoč.

PREKINITEV POMOTOMA sproženega KLICA V SILI

Pritisnite rdeči "GUMB ZA VRNITEV V STANJE PRIPRAVLJENOSTI" na hrbtni strani telefona *Lifeline*. če to storite dovolj kmalu, prekinete klic v sili, telefon pa se povrne v stanje pripravljenosti. če vam to ne uspe, nič zato. Klicana oseba oz. večurni operater v centru službe "Halo, pomoč!" bo vesel, da je z vami vse v redu in da vaš telefon *Lifeline* dobro deluje.

VAŽNO OPOZORILO!

če ste ob zvonjenju telefona *Lifeline* "dvignili slušalko" s pritiskom na rdeči gumb brezžičnega sprožilja in se še pogovarjate, sprožite klic v sili tako, da **dvakrat pritisnete na rdeči gumb**: po prvem pritisku počakajte, da bo lučka na brezžičnem sprožilju zasvetila in ugasnila. Nato

ponovno pritisnite na rdeči gumb.

KAJ, ČE JE VAŠ TELEFON ZASEDEN?

Kadar z vašim brezžičnim sprožilom ali z rdečim alarmnim gumbom telefona sprožite klic v sili, se vsak telefonski razgovor po telefonu *Lifeline* prekine, tako da vaš klic v sili lahko potuje na izbrane telefonske številke - npr. v center službe "Halo, pomoč!".

KONČANJE KLICA V SILI

Klic v sili, ki je bil usmerjen v sprejemni center službe "Halo, pomoč!", bo sprejel in končal operater v centru. S pomočjo svoje naprave bo, potem ko bo poskrbel za vas, kar na daljavo "odločil slušalko" vašega telefona *Lifeline* in tako končal klic. če je bil vaš klic v sili usmerjen na telefonsko številko, na katero je priključen navaden telefonski aparat (npr. k vašim svojcem ali sosedom), je potrebno klic v sili končati s posebnim postopkom in tako preprečiti, da bi telefon *Lifeline* samodejno klical še na druge vpisane številke za klic v sili. **Oseba na sprejemni strani** mora s pomočjo svojega telefona ali s posebno napravo - piskačem oddati dva piska določene višine. Pri telefonih s tonskim izbiranjem števil (MFC) je potrebno na telefonu pritisniti:


1. tipko "*";
2. tipko "#".

Tiste osebe, ki na sprejemni strani ne uporabljajo telefona s tonskim izbiranjem in želijo sprejeti in končati klic v sili, morajo uporabiti "piskač". Za končanje klica v sili morajo prisloniti piskač k tistemu delu slušalke, v katerega govorimo in pritisniti:

1. tipko "*";
2. tipko "#".

V obeh primerih se zasliši poseben zvok iz slušalke, ki potrjuje prekinitev telefonske zveze.


GUMB ZA VRNITEV V
STANJE PRIPRAVLJENOSTI

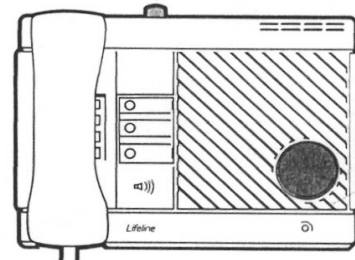

TELEFON Lifeline 2 Plus V VLOGI NAVADNEGA TELEFONA

POGOVOR BREZ DVIGOVANJA SLUŠALKE

Vaš posebni telefon *Lifeline* deluje tudi kot navaden telefonski aparat z nekaj dodatnimi sposobnostmi. Ena izmed teh je pogovor "brez slušalke", ki vam omogoča sprejem klicev, klicanje ali telefonski pogovor brez dvigovanja oz. držanja slušalke v rokah. V ta namen uporabite gumb "BREZ SLUŠALKE".

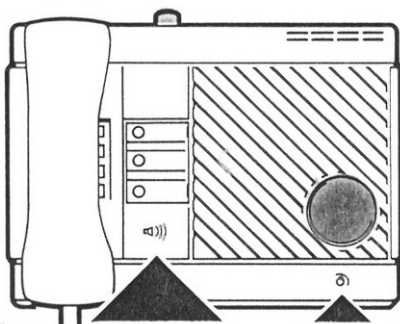

POGOVOR BREZ
SLUŠALKE V ROKAH

LUČKA STANJA
POZIVA

S pritiskom na ta gumb lahko preklopite na način "pogovor brez slušalke" tudi med samim pogovorom. Slušalko odločite, ko se prižge lučka "STANJE POZIVA". Prav tako lahko med pogovorom enostavno preidete iz "pogovor brez slušalke" v "pogovor s slušalko", če dvignete slušalko. Lučka "STANJE POZIVA" ugasne.

KAKO SPREJMETE KLIC

Izirate lahko med tremi možnostmi:

1. dvignete slušalko;
2. pritisnete gumb "BREZ SLUŠALKE".
3. pritisnete vaš brezžično sprožilo in sprejmete poziv, čeprav ste oddaljeni od posebnega telefona Lifeline.

KAKO PREKINETE KLIC

1. če ste uporabili slušalko, slušalko odločite;
2. če ste se pogovarjali "brez slušalke", ponovno pritisnete na gumb "BREZ SLUŠALKE";
3. če ste klic sprejeli s pritiskom na brezžično sprožilo, klic prekinete s ponovnim pritiskom na rdeči gumb brezžičnega sprožila.

OPOZORILO!


Pritisk na rdeči gumb na telefonu ali brezžičnem sprožilu v tretje bo sprožil klic v sili.

PONOVRNO IZBIRANJE ZADNJE KLICNE ŠTEVILKE

Za ponovno izbiranje zadnje številke, ki ste jo izbrali na številčnici telefona *Lifeline*, pa je bil klicani naročnik n.pr. zaseden:


1. položite slušalko;
2. slušalko ponovno dvignite;
3. pritisnite "#";
4. pritisnite "*".

Telefon bo samodejno odvrтел številko, ki ste jo nazadnje izbrali.

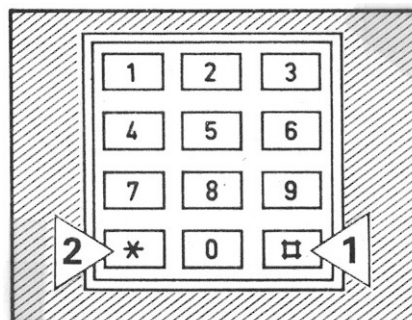

UPORABA TIPK ZA "SKRAJŠANO IZBIRANJE"

Skrajšano izbiranje vam omogoča, da s pritiskom na **en sam** gumb telefona izberete eno od treh najpogosteje klicanih števil. Pritisnite na tistega od treh gumbov za "SKRAJŠANO IZBIRANJE", ob katerem je zapisano ime osebe, ki jo želite poklicati. Ob takem klicu vam niti ni treba dvigovati slušalke. če želite opraviti zaupen pogovor, po vsakem pritisku na gumb za "SKRAJŠANO IZBIRANJE" dvignite slušalko.

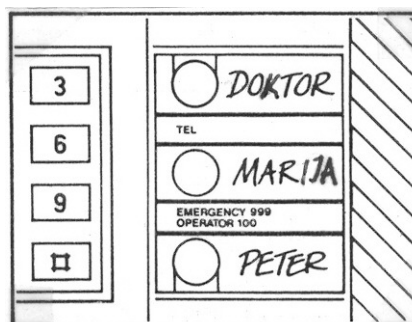

PROGRAMIRANJE ŠTEVILK ZA SKRAJŠANO IZBIRANJE

Telefonske številke za "SKRAJŠANO IZBIRANJE" vpisujemo takole:

1. dvignite slušalko;
2. pritisnite "*";
3. pritisnite zgornji gumb za skrajšano izbiranje;
4. vpišite želeno telefonsko številko;
5. ponovno pritisnite "*";
6. položite slušalko.

S tem je številka vpisana v pomnilnik telefona *Lifeline*. Telefon jo bo samodejno odvrtil, kadar boste pritisnili na zgornjo tipko za "SKRAJŠANO IZBIRANJE".

Postopek ponovite za srednjo in spodnjo tipko za "SKRAJŠANO IZBIRANJE", vpišite pa preostali dve najpogostejše klicani številki.

S pilico za nohte ali podobnim koničastim predmetom dvignite plastiko, ki pokriva kartico vzdolž slušalke. Na kartico vpišite imena ljudi, ki naj bi jih klicali, in namestite plastiko na prvotno mesto.

BRISANJE ŠTEVILKE ZA SKRAJŠANO IZBIRANJE

1. dvignite slušalko;
2. pritisnite "*";
3. pritisnite gumb za "SKRAJŠANO IZBIRANJE" številke, ki jo želite zbrisati;
4. ponovno pritisnite "*";
5. položite slušalko.

DODATKI K POSEBNEMU TELEFONU *Lifeline 2 Plus*


Na telefon *Lifeline 2 Plus* lahko priključimo naslednje dodatke in naprave :

- stropno potezno stikalo;
- protivlomno alarmno napravo;
- senzor gibanja v prostoru;
- detektor dima (brezžični ali povezan s telefonom *Lifeline* z žico);
- senzor nizke temperature;
- druga stikalna tipala.

Več informacij dobite pri službi "Halo, pomoč!" ali pri zastopniku.

OPAZOVANJE DOGAJANJA V PROSTORU

Sprejemni center lahko s pomočjo npr. pohodne blazine, ki je nameščena pod preprogo, opazuje, če je stanovalec zadnjih 12 oz. 24 ur sploh vstal iz postelje in stopil na blazino. Če ni, telefon *Lifeline* samodejno pokliče na ustrezno telefonsko številko in vzpostavi zvočno povezavo. Oseba, ki je ostala v postelji, bo lahko kar iz postelje pojasnila svoje težave.

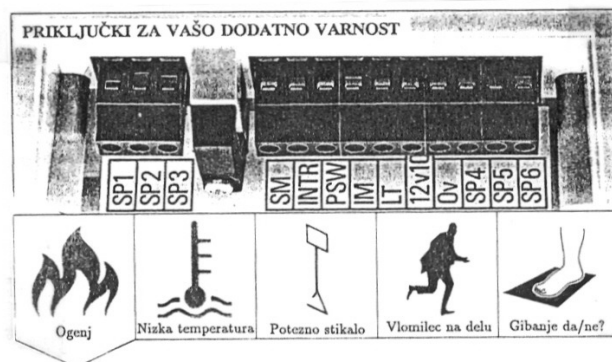

IZKLOP OPAZOVANJA DOGAJANJA V PROSTORU

če greste od doma za več kot 12 oz. 24 ur, izključite opazovanje z naslednjimi potezami:

1. dvignite slušalko
2. pritisnite tipko "*" in nato tipko "9"
3. pritisnite tipko "#"


Ko boste naslednjič uporabili vaš telefon *Lifeline*, bo telefon spet spremljal gibanje v vašem stanovanju.

VAŽNE OPOMBE

1. če telefon *Lifeline* pomotoma izključite ali potegnete enega od vtičev iz vtičnice, bo telefon oddal opozorilni zvočni signal.
2. če hočete telefon *Lifeline* prestaviti na drugo mesto, pri tem pa ga je potrebno izklopiti, morate najprej odklopiti telefonsko vrvico, šele nato izvlecite napajalnik iz električne vtičnice. Ko priključujete telefona *Lifeline*, najprej vtaknite napajalnik v električno vtičnico in šele nato priključite telefonsko vrvico.
3. V primeru izpada električne energije bo vaš telefon *Lifeline* deloval še vsaj 20h z vsemi prej opisanimi sposobnostmi. Za to bo poskrbela v telefon vgrajena akumulatorska baterija. Telefon *Lifeline* deluje po tem času kot navaden telefon. Kadar izpad omrežne

napetosti traja več kot eno uro, telefon Lifeline samodejno pokliče v sprejemni center.

4. če telefon Lifeline ne deluje, preverite, če je priključen na električno omrežje (kolobar okrog rdečega gumba na telefonu Lifeline mora svetiti). Preverite, če je telefonska vrstica pravilno vtaknjena v telefonsko vtičnico. Ko ste izključili te močne vzroke, telefon pa še ne deluje, stopite v stik s centrom službe "Halo, pomoč!" ali dobaviteljem vašega telefona Lifeline.
5. Za nastavev glasnosti slušalke in zvočnika je na desni strani telefona Lifeline drsno stikalo s tremi nivoji glasnosti: "NIZEK", "SREDNJI", "VISOK".

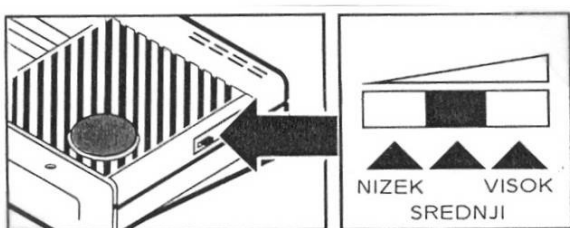

6. če nosite slušni aparat za ušesom, boste telefonski pogovor lahko normalno poslušali, če si boste slušalko prislonili na uho. Stikalo slušnega aparata morate postaviti v položaj "T".
7. Priporočamo, da vzporedno k aparatu Lifeline ne priključujete dodatnih telefonov, ker lahko pride do preobremenitve telefonske linije oziroma oviranja klica v sili.
8. Ob vsakem pritisku na gumb brezžičnega sprožila se bo rdeča lučka na brezžičnem sprožilu prižgala za 5 sekund. Glede na obnašanje lučke lahko sklepate na stanje baterij v sprožilu:

lučka **sveti**: baterije v dobrem stanju.
lučka **utripa**: **baterije je treba čimprej zamenjati.**
lučka **ne sveti**: **baterije je treba takoj zamenjati.**

ZAMENJAVA BATERIJ

Za zamenjavo baterij pokličite službo "Halo, pomoč!". V kolikor želite to opraviti sami, upoštevajte naslednja navodila:

- primate brezžično sprožilo tako, da bosta vijaka obrnjena navzgor.
- z izvijačem odvijte oba vijaka in dvignite pokrovček.
- obrnite brezžično sprožilo tako, da bodo štiri baterije lahko padle ven. Stare baterije zavrzite in brezžično sprožilo odločite.
- preverite, da se svetlosivo gumijasto tesnilo v pokrovčku brezžičnega sprožila v vogalih dobro prilega.
- vzemite brezžično sprožilo in ga postavite pokonci tako, da je "GUMB ZA KLIC V SILI" obrnjen proč od vas. Previdno vložite baterije.
- držite brezžično sprožilo pokonci in ponovno namestite pokrovček. Pazite, da se odprtina na pokrovčku prilega rdeči lučki.
- pritisnite pokrovček navzdol in močno pritrđite oba vijaka.
- brezžično sprožilo preizkusite s pritiskom na alarmni gumb tako, da pokličete sprejemni center. Rdeča luč se prižge in ostane prižgana približno 5 sekund.

DOVOLJENJA

Odobreno za uporabo v Sloveniji v skladu z navodili za uporabo:

PTT atest št.:346-17/001/92

RSO atest št.:NN0491081

Certif. el. varnosti št.:P5344-119/91

Zastopstvo in prodaja:"

MKS Elektronski sistemi d.o.o

Rožna dolina C.XVII/22b

1000 LJUBLJANA

tel./fax (01) 256-22-43, 256-22-44